



Das smarte Hausnotrufsystem für Alleinlebende

HOME Basic/Basic+



Gebrauchsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf eines HOME Basic/ HOME Basic + aus unserem Hause entschieden haben. Bei easierLife HOME Basic / HOME Basic + handelt es sich im Wesentlichen um ein klassisches Hausnotruf-System. Das easierLife System kann Benachrichtigungen an Angehörige, Freunde und Nachbarn schicken. Alternativ kann auch eine professionelle 24*7 Alarmempfangsstelle eingebunden werden.

Für den Betrieb ist kein Internet notwendig, da das System mit einer integrierten Mobilfunkkarte arbeitet.



Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der ersten Anwendung sorgfältig durch, denn eine korrekte Nutzung von easierLife ist nur bei richtiger Handhabung der Geräte möglich. Betreiben Sie die Basisstation und den Notrufknopf gemäß den Informationen in der Gebrauchsanleitung. Bewahren Sie diese sorgfältig auf und machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich. Überprüfen Sie die Geräte auf äußere Unversehrtheit der Verpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts.

Lieferumfang:

- 1 Basisstation
- 1 Netzteil für Basisstation
- Notrufknopf inklusive Armband und Halskette
- Gebrauchsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1. Wichtige Hinweise	4
2. Gerätebeschreibungen	8
3. Funktionen der Komponenten	10
4. Die easierLife App	11
4.1 Download	11
4.2 Benutzerrechte	11
4.3 Registrierung für Manager	12
4.4 Helfernetzwerk einrichten	12
4.5 Änderung der Zahlungsdaten	13
4.6 Symbole in der easierLife App	13
5. Installation des Systems und Inbetriebnahme	13
5.1 Basisstation installieren	13
5.2 Notrufknopf in Betrieb nehmen	14
6. Notruf testen	15
7. Erklärung von Fehleranzeigen	15
8. Datenschutz	16
9. Garantiebedingungen	17
10. Kontaktdaten bei Kundenfragen	18
11. Technische Daten	19
12. EU Konformitätserklärung	20
13. Weiteres Zubehör	21



Hinweis: Sie können diese Gebrauchsanleitung sowie alle anderen Gebrauchsanleitungen zu den Zubehörteilen auch über unsere Internetseite www.easierlife.de abrufen.

1. Wichtige Hinweise

Zeichenerklärung



Beobachtung der Bedienungsanleitung



Bitte beachten



Temperaturbegrenzung



Luftfeuchte, Begrenzung



Trocken aufbewahren



Entsorgungshinweise Pappe PAP



Symbol zur Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten



Verpackung umweltgerecht entsorgen



Verpackung umweltgerecht entsorgen

LOT

Chargencode



Kennzeichnung nach der Richtlinie 2001/65/EU



Verpackung umweltgerecht entsorgen



Funkreichweite

Durch verschiedene Materialien und Störquellen kann die Funkreichweite der Sensoren und Notrufknöpfe zur Basisstation reduziert werden. Berücksichtigen Sie daher folgende Punkte:

- Ein Mindestabstand zu Wärmequellen, Lampen und Belüftungssystemen von ca. 1,2m ist empfehlenswert.
- Baumaterialien (Wände) und Hindernisse im Raum könnten die Funksignale stören und müssen in die Planung mit einbezogen werden.
- Der Notrufknopf hat eine maximale Reichweite von zwei Kilometern



Hinweise zu Batterien

- Verschluckungsgefahr
- Kleinkinder könnten Batterien verschlucken und daran ersticken. Daher Batterien für Kleinkinder unerreichbar aufbewahren!
- Explosionsgefahr. Keine Batterien ins Feuer werfen!
- Batterien dürfen nicht geladen oder kurzgeschlossen werden.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen. Sollte Flüssigkeit aus einer Batteriezelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommen, die betroffene Stelle mit Wasser reinigen und ggf. ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme.
- Keine Batterien zerlegen, öffnen oder zerkleinern.



Hinweise zur Entsorgung

- Im Interesse des Umweltschutzes dürfen verbrauchte Batterien nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Entsorgungsvorschriften oder nutzen Sie öffentliche Sammelstellen.
- Dieses Produkt unterliegt der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ist entsprechend gekennzeichnet. Entsorgen Sie elektronische Geräte nie mit dem Haushaltsabfall. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit.



Sicherheitshinweise zu den Geräten

- Die Basisstation ist nicht wasserdicht!
- Der Notrufknopf ist wasserdicht nach IP68 und kann unter fließendem Wasser gereinigt werden.
- Die Geräte bestehen aus hochwertigen elektronischen Präzisionsteilen. Die Genauigkeit der Sensorwerte und Lebensdauer der Geräte hängen vom sorgfältigen Umgang ab.
- Schützen Sie die Geräte vor starken Erschütterungen, Schlägen oder Vibrationen und lassen Sie sie nicht auf den Boden fallen.
- Die Basisstation niemals öffnen.
- Die Geräte dürfen nicht abgeändert, auseinandergenommen oder selbst repariert werden. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden.
- Die Geräte weder extremen Temperaturen, noch Feuchtigkeit, Staub oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, da dies zu Funktionsstörungen führen kann.
- Beachten Sie bitte die Lager- und Betriebsbedingungen in Kapitel „Technische Daten“. Eine Lagerung oder Benutzung außerhalb der festgelegten Temperatur- und Luftfeuchtebereiche kann die Genauigkeit der Sensorwerte sowie die Funktion der Sensoren und Geräte beeinflussen.


- Das Gerät nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern benutzen und von Funkanlagen oder Mobiltelefonen fernhalten. Tragbare und mobile Hochfrequenz- und Kommunikationsgeräte wie Telefon und Handy können die Funktionsfähigkeit dieses elektronischen Gerätes beeinträchtigen.



Stromversorgung (Batterien, Netzgerät)

- Auf Polaritätskennzeichen Plus (+) und Minus (-) achten.
- Verwenden Sie ausschließlich hochwertige Batterien (siehe Angaben unter „Technische Daten“).

2. Geratbeschreibungen

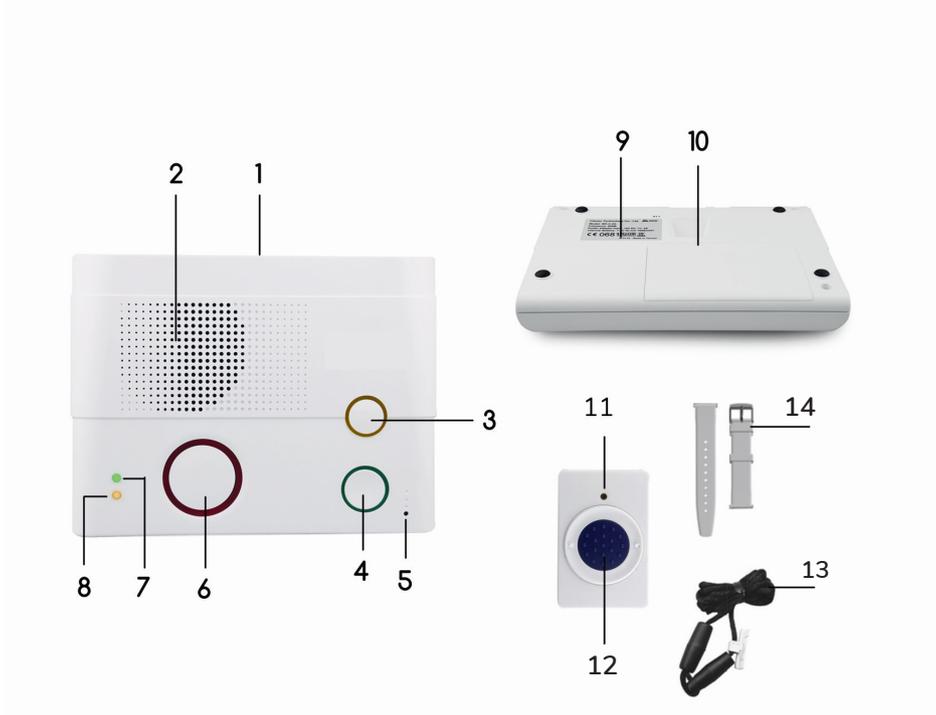

Basisstation

1. Netzgerät-Anschluss
2. Lautsprecher
3. Bedientaste zum Hinzufügen von Zubehör
4. Taste für Rückrufbitte
5. Mikrofon
6. Notrufknopf
7. Kontrollsignal Anschluss Netzgerät
Zusatzfunktion: Lautstärke der Freisprecheinrichtung erhöhen
8. Kontrollsignal für Notstromaggregat und Funkverbindung
Zusatzfunktion: Lautstärke der Freisprecheinrichtung verringern
9. QR-Code zur erstmaligen App-Registrierung und Zuordnung der Basisstation zum App-Nutzer
10. Ein-/Ausschaltknopf für das integrierte Notstromaggregat

Notrufknopf

11. LED-Anzeige
12. Notrufknopf
13. Halskette
14. Armbandriemen (2 x)

3. Funktionen der Komponenten

Basisstation

- Durch Drücken der grünen Taste kann der Nutzer um einen Rückruf bitten. Dem Nutzer geht es gut und Sie können bei Gelegenheit Kontakt mit ihm aufnehmen.
- Durch Drücken der roten Taste wird ein Alarm ausgelöst. Dieser Alarm hat höchste Priorität.
- Löst der Nutzer z.B. durch Drücken der roten Taste einen Alarm aus, hat die Notrufzentrale die Möglichkeit, direkt mit dem Nutzer über die Freisprecheinrichtung (Mikrofon) der Basisstation zu sprechen um abzuklären, ob vor Ort alles in Ordnung ist oder einen der eingetragenen Helfer zu kontaktieren. Der Anrufer kann in Alarmsituationen in den Raum hineinhören und über den Lautsprecher kommunizieren. Aus technischen Gründen wird bei dem Anruf an die Basisstation eine deutsche Telefonnummer angerufen. Hier fallen je nach Tarifmodell zusätzliche Telefongebühren für den Anrufer an.
- Die Basisstation ist gegen Stromausfälle mit einem integrierten Notstromaggregat abgesichert und kann daher bis zu 41 Stunden ohne Stromversorgung auskommen. Bitte beachten Sie: In dieser Situation werden ausschließlich Benutzeralarme, die durch den Notrufknopf ausgelöst wurden, gemeldet.

Notrufknopf

- Durch Drücken des Notrufknopfs werden automatisch Notfall-Benachrichtigungen an zuvor bestimmte Personen versendet.
- Der Notrufknopf kann als Armband oder Halskette getragen werden.
- Der Notrufknopf arbeitet mit einer langlebigen Batterie und überträgt drahtlos seine Daten an die Basisstation.

4. Die easierLife App (Einrichtung ist für Basic+ optional)

4.1 Download

Die easierLife App ist derzeit für iOS und Android verfügbar. Beide Versionen sind im jeweiligen App-Store kostenlos erhältlich.



4.2 Benutzerrechte

Das System arbeitet mit zwei unterschiedlichen Rollenprofilen: Manager und Helfer. Manager und Helfer können mehreren Haushalten zugeordnet werden.

Manager

Die Person (i.d.R. ein nahestehender Angehöriger), welche sich als erstes im System anmeldet, fungiert in dieser Rolle. Sie übernimmt die Installation und Inbetriebnahme und wird im Alarmfall benachrichtigt.

Die Einstellungen zum Haushalt sollten gemeinsam mit der allein lebenden Person erfolgen.

Der Manager hat folgende Rechte:

- Definition der Benachrichtigungsparameter nach jeweiligem Tagesablauf des Nutzers
- Definition der persönlichen Benachrichtigungsoptionen per App oder zusätzlichen E-Mails
- Hinzufügen von Helfern durch Versendung einer E-Mail-Einladung an die Helfer
- Installation bzw. Hinzufügen von Sensoren
- Hinzufügen und Ändern der Rufnummer
- Änderung des Profilbildes und des Namens des Haushalts

Helfer

Als zusätzliche Helfer können Angehörige, Nachbarn oder Freunde dienen. Helfer werden im Alarmfall ebenfalls benachrichtigt.

Ein Helfer hat folgende Rechte:

- Wahl der optionalen Benachrichtigung per E-Mail

4.3 Registrierung für Manager

Führen Sie die Registrierung des Managers zusammen mit der Installation des easierLife Basissets bei der allein lebenden Person, dem Nutzer des Systems, durch.

- Laden Sie die kostenlose easierLife App aus dem Apple App Store oder dem Google Play Store herunter.
- Starten Sie die App und wählen Sie den Menüpunkt „Konto erstellen“.
- Es erscheint automatisch ein QR-Code-Leser zum Registrieren der Seriennummer der Basisstation.
- Lesen Sie den QR-Code von der Rückseite der Basisstation ein.
- Folgen Sie nun dem Registrierungsprozess in der easierLife App. Hierüber wird das easierLife Basisset aktiviert und die Einwilligung des Nutzers eingeholt.
- Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie E-Mails zur Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse, die elektronisch unterschriebene Einwilligungserklärung und eine Bestellbestätigung.

4.4 Helfernetzwerk einrichten

- Der Manager wählt im Seitenmenü „Helfer“ aus und gibt den Namen und die E-Mail-Adresse des Helfers an.
- Der Helfer bekommt eine Einladungs-E-Mail zur Aktivierung seines Nutzerkontos und der Festlegung des selbstgewählten Passwortes.
- Nach Erscheinen der Bestätigungsmeldung kann die easierLife App mit einem Klick auf das Apple App Store- oder Google Play Store-Logo heruntergeladen werden.
- Nach der Registrierung ist der Helfer automatisch dem richtigen Haushalt zugeordnet.

Wenn ein Helfer die easierLife App auf seinem Smartphone installiert und sich als Helfer registriert hat, kann er Benachrichtigungen auf seinem Smartphone empfangen. Zudem kann über die App sehr einfach eine direkte Sprachverbindung zur Basisstation hergestellt werden.

4.5 Änderung der Zahlungsdaten

Wählen Sie als Manager im Seitenmenü „Profil“ aus. Dort können Sie unter dem Menüpunkt „Zahlungseinstellungen“ Ihre hinterlegten Zahlungsmodalitäten ändern oder das Abonnement kündigen.

4.6 Symbole in der easierLife App

Ereignisse, die eine ungewöhnliche bis alarmierende Situation anzeigen:



Benutzeralarm

Der Notrufknopf an der Basisstation oder am Notrufknopf wurde gedrückt

5. Installation des Systems und Inbetriebnahme

Führen Sie die Installation des easierLife Basisset bei der allein lebenden Person (Haushalt) zusammen mit der Registrierung des Managers durch. So können Sie alle notwendigen Angaben in einem Ablauf vornehmen.

5.1 Basisstation installieren

Die Basisstation sollte so zentral wie möglich in der Wohnung oder im Haus aufgestellt werden, da sie auch über eine Freisprecheinrichtung verfügt.

Schließen Sie die Basisstation mit Hilfe des Netzgerätes an eine Stromquelle an und schalten Sie den Schalter auf der Rückseite auf „On“.

Die korrekte Installation wird durch ein akustisches Signal bestätigt. Darüber hinaus erscheint eine Nachricht in der Ereignisliste der easierLife App.

5.2 Notrufknopf in Betrieb nehmen

Der im Baisset enthaltene Notrufknopf ist bereits mit der Basisstation verbunden. Es ist trotzdem sinnvoll die Funktionsbereitschaft zu überprüfen.

Testen des Notrufknopfs

Drücken Sie den Notrufknopf. Sie erhalten eine akustische Rückmeldung von der Basisstation, wenn der Notrufknopf eingelesen wurde und in der App wird ein „Benutzeralarm“ angezeigt.

Tragevarianten

Der Notrufknopf kann als Anhänger mit Halskette oder als Armband getragen werden.

Tragevariante 1 - Halskette:

- Drehen Sie den Notrufknopf auf die Rückseite.
- Ziehen Sie die Kette vorsichtig in paralleler Richtung zum Notrufknopf durch die Öse.



Tragevariante 2 - Armband:

- Drehen Sie den Notrufknopf auf die Rückseite.
- Nehmen Sie die Armbandriemen und haken Sie sie vorsichtig an den Seiten des Notrufknopfs ein.



6. Notruf testen

Nach Installation des Geräts ist es von großer Wichtigkeit das System auf Funktionalität zu überprüfen. Drücken Sie hierzu den roten Knopf auf der Basisstation, es wird automatisch eine Verbindung zur Notrufzentrale aufgebaut. Sobald die Notrufzentrale den Anruf entgegengenommen hat erwähnen Sie kurz, dass es sich um einen Testanruf handelt.

7. Erklärung von Fehleranzeigen

Nutzen Sie die folgenden Informationen und unsere FAQ (häufig gestellten Fragen) auf unseren Internetseiten, um Fehler selbst zu beheben: www.easierlife.de

Bevor Sie die Geräte reklamieren, prüfen Sie bitte in der zugehörigen App, ob die Batterien leer sind, und tauschen Sie diese ggf. aus.

Der grüne Knopf an der Basisstation blinkt

Das Netzgerät ist nicht angeschlossen und muss wieder eingesteckt werden. Die Basisstation soll immer mit dem Netzgerät betrieben werden.

Der orangefarbene Knopf an der Basisstation blinkt alle 3 Sekunden

Das integrierte Notstromaggregat ist schwach oder es gibt eine Überspannung. Bitte nutzen Sie das Netzgerät und kontaktieren Sie unseren Kundendienst, wenn das Problem weiterbesteht.

Der orangefarbene Knopf an der Basisstation blinkt zweimal pro Sekunde

Es liegt eine Funkstörung vor. Bitte überprüfen Sie mit den Testtasten der Sensoren, ob diese mit der Basisstation kommunizieren. Falls die Sensoren einwandfrei mit der Basisstation kommunizieren, positionieren Sie bitte die Basisstation an einem anderen Ort – möglichst in Fensternähe – um eine bessere mobile Netzabdeckung zu gewährleisten. Falls sich das Blinken nicht abstellt, kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Es werden keine oder verzögerte Daten von der Basisstation an die App gesendet (in der App erscheint die Meldung „Basisstation offline“)

Die mobile Netzabdeckung am Standort der Basisstation ist nicht ausreichend. Positionieren Sie bitte die Basisstation an einem anderen Ort – möglichst in Fensternähe – um eine bessere mobile Netzabdeckung zu gewährleisten.

Der Notrufknopf blinkt nicht beim Drücken oder die Basisstation gibt keinen Bestätigungston

Bitte überprüfen Sie, ob der Batteriestand des Notrufknopfs niedrig ist. Überprüfen Sie ebenfalls die korrekte Installation und die Entfernung zur Basisstation.

Es werden keine Daten vom Notrufknopf gesendet.

Bitte überprüfen Sie, ob der Batteriestand niedrig ist. Überprüfen Sie ebenfalls die korrekte Installation und die Entfernung zur Basisstation.

8. Datenschutz

Die easierLife GmbH stellt grundsätzlich höchste Anforderungen an den Datenschutz.

Unser Grundsatz

Wir nehmen den Schutz von persönlichen Daten sehr ernst und behandeln insbesondere personenbezogenen Daten vertraulich und selbstverständlich immer entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie der Datenschutzerklärung.

Hierbei halten wir die sieben goldenen Datenschutzregeln ein: Einwilligung, Zweckbindung, Rechtmäßigkeit, Datensparsamkeit, Transparenz, Datensicherheit und Kontrolle.

Einwilligung, Zweckbindung, Rechtmäßigkeit

Es ist uns wichtig, dass das easierLife System im Einvernehmen aller Parteien eingesetzt wird. easierLife soll nicht überwachen, sondern eine Unterstützung für alle Beteiligten darstellen. Aus diesem Grund holen wir die Einwilligung der allein lebenden Person ein, bevor wir die von den Sensoren erfassten Daten zum Betrieb des easierLife Systems verwenden. Das easierLife System benötigt außerdem nur diejenigen Daten, die für den Betrieb des Systems auch wirklich erforderlich sind. Wir gehen verantwortungsvoll und sicher mit diesen um und verarbeiten sie nur zu genau diesem Zweck.

Datensparsamkeit und Transparenz

Um easierLife für Sie so transparent wie möglich zu machen, geben wir Ihnen die Möglichkeit mit dem Nutzer gemeinsam zu definieren, welche Situationen überhaupt durch das easierLife System erkannt werden sollen. Ist das Erkennen einer Situation nicht notwendig, kann diese deaktiviert werden. So können Sie und der Nutzer bestimmen, welche Daten ermittelt werden und welche nicht, und eine Datensparsamkeit kann gewährleistet werden.

Datensicherheit

Durch den Passwort-Schutz haben nur berechtigte Personen Zugriff auf das easierLife System. Sie als Kunde bestimmen, wer dies ist. Die Sensorwerte werden vom easierLife System an gesicherte deutsche Server verschlüsselt übertragen. Dort werden die von der Datenschutzgrundverordnung (Artikel 32 DSGVO) geforderten technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Datensicherung eingehalten.

Kontrolle

Durch unsere Datenschutzbeauftragte werden bestehende und neue Entwicklungen am easierLife System regelmäßig auf die korrekte Einhaltung datenschutzrechtlicher Fragestellungen untersucht. Sie beantwortet außerdem alle Ihre Anfragen bei Unklarheiten umgehend. Weitere Informationen finden Sie auch unter www.easierlife.de/Datenschutz

9. Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde, Sie haben ein Qualitäts-Produkt der easierLife GmbH erworben. Wir bedanken uns für Ihre Entscheidung. Um die Qualität sicherzustellen, wurde jedes Produkt vor der Auslieferung ausführlich auf einwandfreie Funktion geprüft und ohne im Test erkennbare Defekte ausgeliefert. Sollte es dennoch einmal zu einem Schaden gekommen sein, gelten nachfolgende Regelungen:

Garantie

Die Garantie beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum gemäß Kaufbeleg.

Lieferumfang und Kaufbeleg

Bitte legen Sie das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs sowie Ihren Original-Kaufbeleg bei der Beanspruchung der gesetzlichen Garantie oder Gewährleistung demjenigen vor, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Er wird sich um die weitere Vorgehensweise kümmern. Oder senden Sie das Produkt zusammen mit einer Kopie des Kaufbeleges, Ihrer Adresse und Ihrer Telefonnummer und Ihrer E-Mail-Adresse (wenn vorhanden) sowie der Beschreibung der Störung an die easierLife GmbH oder an die Serviceadresse Ihres Landes.

Gewährleistungsfrist

Die gesetzliche Gewährleistungsfrist wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit wird verlängert, falls dies eine gesetzliche Regelung vorsieht. In Ländern, in denen eine zwingende Garantie über die gewährte Garantiezeit hinaus und/oder eine Ersatzteilerhaltung und/oder eine Schadensersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die dortigen gesetzlichen Vorschriften.

10. Kontaktdaten bei Kundenfragen

easierLife GmbH
Herrenstraße 50a
76133 Karlsruhe
Deutschland

Mail: support@easierlife.de

Web: www.easierlife.de

Stand der Information: Juni 2018

11. Technische Daten

Basisstation

- Leistung: 12V, 1.5 Ampere Schaltleistung
- Notstromaggregat Backup-Zeit: bis zu 41 Stunden
- Notstromaggregat Batterie: 6x 1.2V Ni-Cd Akku
- Lautsprecher: 3 Watt
- Funkfrequenz: 869,2375 MHz (europäische Notruf-Frequenz)
- Reichweite: bis 400m
- Betriebs-/Lagerbedingungen:
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +45°C
- Luftfeuchtigkeit: bis zu 90%, nicht kondensierend
- Maße: 57 x 164 x 216mm

Bewegungssensor

- Batterie: 1x CR123A 3V Lithiumbatterie
- Funkfrequenz: 869,2375 MHz
- Funkreichweite: > 200m im offenen Gelände
- Betriebs-/Lagerbedingungen:
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Luftfeuchtigkeit: bis zu 95%, nicht kondensierend
- Maße: 88 x 66 x 47mm

Türsensor

- Batterie: 1x CR2 3V Lithiumbatterie
- Funkfrequenz: 869,2375 MHz
- Funkreichweite: > 200m im offenen Gelände
- Betriebs-/Lagerbedingungen:
- Umgebungstemperatur: -10°C bis +40°C
- Luftfeuchtigkeit: bis zu 95%, nicht kondensierend
- Maße: 85 x 22 x 20mm

Notrufknopf

- Batterie: 1 x CR2032 3 V Lithiumbatterie
- Funkfrequenz: 869,2375 MHz
- Funkreichweite: > 400 m im offenen Gelände
- Betriebs-/Lagerbedingungen:
- Umgebungstemperatur: -10 °C bis +45 °C
- Luftfeuchtigkeit: bis zu 85 %, nicht kondensierend
- Maße: 48 x 36 x 13,5 mm

12. EU Konformitätserklärung

Der Importeur: Climax Deutschland GmbH

Adresse: Max-Planck-Straße 10
50858 Köln
Deutschland

erklärt, dass das Produkt: easierLife Basisset (MX-3, DC-16SL, IRP-29SL-RST, WTRQ3) die grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 der nachstehenden EU-Richtlinie(n) erfüllt:

2014/53/EU (RED) Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und die folgenden harmonisierten Normen angewandt wurden:

- IEC 60950-1 / EN- 60950-1:2001 Power Safety
- EMC Directive 2014/30/EU
- EN-300220-2:2006 Short Range Radio
- EN 301489-1 V.1.9.2:2011
- EN 301489-7 V.1.3.1:2005
- EN 301489-24 V.1.5.1:2010
- EN 50130-4:2011
- (IEC/EN 61000-4-2:2009; -3:2006, +A2:2010; -4:2012; -5:2014; -6:2014, -11:2004)
- EN-50134-1/-2/-3/-4/-5:2002 Social Alarm

Ort und Datum der Konformitätserklärung

Köln, 01.02.2017

Name und Unterschrift



Adrian Porger

Geschäftsführer Climax Deutschland GmbH

Hersteller: Climax Deutschland GmbH
Max-Planck-Straße 10
50858 Köln
Deutschland

Vertrieb: easierLife GmbH
Herrenstraße 50a
76133 Karlsruhe
Deutschland
Mail: sales@easierlife.de

13. Weiteres Zubehör

Das Ihnen vorliegenden Basisset ist als Einstiegsset für eine Wohnung mit normaler Größe und normalen Grundriss gedacht. Je nach Gegebenheit kann es sinnvoll sein, zusätzliche Sensoren anzubringen.

Neben der Größe der Wohnung können aber auch andere Faktoren eine Rolle spielen, die weiteres Zubehör sinnvoll machen. Es ist beispielweise möglich, über Gefahrenmelder (Rauchmelder usw.) akute Gefahren zu erkennen.

Bewegungssensor

- Als Erweiterung für große Wohnungen und Häuser
- Mehr Sicherheit im Bad, Schlafzimmer, Küche und Keller
- Unempfindlich gegenüber Haustieren mit bis zu 27 kg (optional)



Kontakt-/Türsensor

- Erweiterung für Häuser mit mehr als einer Zugangstür
- Befestigung am Kühlschrank oder Besteckfach zur Überprüfung der regelmäßigen Nahrungsaufnahme



Notrufknopf

- Mehr Sicherheit zu Hause, z.B. am Bett, an der Wohnungseingangstür oder im Bad/Toilette
- Als Armband oder Halskette



