



## Bedienungsanleitung HOME Mini

Der klassische Hausnotruf modern gedacht

# Inhaltsverzeichnis

1 Einführung .....	04
1.1 Lieferumfang .....	04
2 Systemübersicht .....	05
2.1 Basisstation.....	05
2.2 Tragbarer Notrufknopf.....	08
3 Installation.....	11
3.1 Aufstellungsort auswählen .....	11
3.2 Netzanschluss und Montage .....	12
3.3 Akkubetrieb und Notstrom Aktivierung.....	13
3.4 Überprüfen der Signalstärke.....	14
4 Bedienung.....	15
4.1 Wer wird bei einem Notruf alarmiert?.....	16
5 Automatische Funktionen.....	18
5.1 Stromausfall.....	18
5.2 Niedriger Akkustand.....	18
5.3 Niedriger Batteriestand des tragbaren Notrufknopf.....	19
5.4 Funkstreckenüberwachung.....	19
5.5 Automatische Kontrollrufe.....	20
6 easierLife App.....	21
7 Wartung, Reinigung und erneuter Einsatz des Notrufsystems .....	22
7.1 Basisstation.....	22
7.2 Tragbarer Notrufknopf.....	23
7.3 Wiedereinsatz des Gerätes.....	23

# Inhaltsverzeichnis

<b>8 Wichtige Hinweise und Indikation von Hausnotruf-Systemen.....</b>	<b>24</b>
8.1 Sicherheitshinweise.....	24
8.2 Anwendungsrisiken und Kontraindikationen.....	25
<b>9 Technische Spezifikationen.....</b>	<b>26</b>
9.1 easierLife HOME Mini.....	26
9.2 Tragbarer Notrufknopf.....	27
<b>10 Datenschutz.....</b>	<b>28</b>
<b>11 Kontaktdaten bei Kundenfragen.....</b>	<b>28</b>
<b>12 EU-Konformitätserklärung.....</b>	<b>29</b>

# 1 Einführung

Der easierLife HOME Mini ist ein modernes und kleines Hausnotruf-System mit dem Sie sich Zuhause rundum sicher fühlen.

Falls ein Notfall geschieht, können Sie auf Knopfdruck Hilfe anfordern. Das Gerät baut über das Mobilfunknetz eine Verbindung zu einer professionellen Notrufzentrale (easierLife HOME Mini) oder zu Ihren Angehörigen (easierLife HOME Mini Family) auf.

Über den eingebauten Lautsprecher können Sie direkt mit Ihren Helferinnen und Helfern kommunizieren, die daraufhin weitere Hilfsmaßnahmen einleiten. Mit dem mitgelieferten tragbaren Notrufknopf können Sie auch einen Notruf auslösen, falls die Basisstation außer Reichweite ist.

Der HOME Mini nutzt die neueste Technologie, sodass Sie im Notfall schnellstens versorgt sind. Dank der kinderleichten Installation sind Sie im Handumdrehen abgesichert: Einfach an den Strom anschließen und schon kann es losgehen! Das moderne Design macht den HOME Mini zu einem modischen Sicherheitsbegleiter für Zuhause.

## 1.1 Lieferumfang

Ihr easierLife HOME Mini enthält folgende Teile:

easierLife HOME Mini Hausnotrufgerät


Montageplatte mit Gummifuß  
und Schrauben/ Dübeln

Netzgerät/ Netzteil

Tragbarer Notrufknopf inkl.  
Armband und Halskette

## 2 Systemübersicht

### 2.1 Basisstation

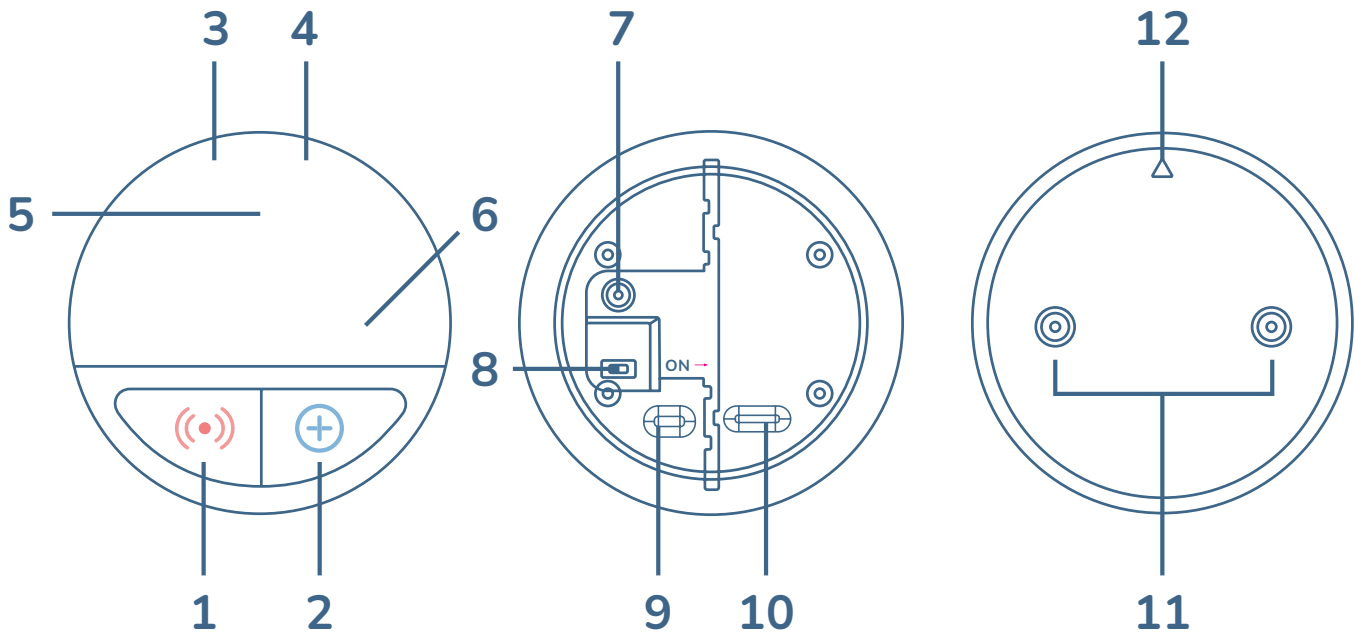

1. Notruftaste  
(siehe Erläuterung)

2. Zusatztaste  
(siehe Erläuterung)

3. Rote LED  
(siehe Erläuterung)

4. Grüne LED  
(siehe Erläuterung)

5. Lautsprecher

6. Mikrofon

7. Stromanschluss

8. Batterieschalter

9. Micro-USB-Anschluss

10. Nano-SIM-Karten-Einschub

11. Befestigungslöcher

12. Dreieck für Montageausrichtung  
(oben)

## 2.1 Basisstation

### Erläuterungen zu HOME Mini Tasten

	Verhalten	Funktion / Bedeutung
Notruftaste	Einmal drücken	Notruf auslösen
	Einmal drücken, während ein eingehender Anruf klingelt	Anruf annehmen
	5 Sekunden drücken während Voralarmzeit	Notruf abbrechen (abhängig von Programmierung)
	5 Sekunden drücken während eines Anrufs oder Notrufs	Auflegen (abhängig von Programmierung)
Zusatztaste	Einmal drücken	Tagestaste „Mir geht es gut“ (abhängig von Programmierung)
	3 Sekunden drücken bis zum Piepton	Anwesend/ Abwesend schalten
	8 Sekunden drücken bis zum zweiten Piepton	Gerät sagt die Signalstärke an

## 2.1 Basisstation


### Erläuterungen der LEDs

	Verhalten	Funktion /Bedeutung
Rote LED	Blinkt alle zwei Sekunden	Niedriger Batteriestand
	Blinkt alle fünf Sekunden	Keine Mobilfunkverbindung
Grüne LED	Leuchtet	Stromversorgung hergestellt
	Blinkt alle fünf Sekunden	Stromversorgung ausgefallen, Batteriebetrieb
	Blinkt alle 2 Sekunden	Zur optischen Signalisierung einer bestehenden Notrufverbindung

### Bezeichnung der einzelnen Elemente

Komponente	Verhalten	Funktion /Bedeutung
7. Stromanschluss		
8. Batterieschalter	Rechts eingeschaltet Links ausgeschaltet  	Nur wenn der Batterieschalter eingeschaltet ist, wird die Batterie der Basisstation geladen und kann bei Stromausfall das Gerät mit Strom versorgen.
9. Micro-USB-Anschluss	Nicht verwenden!	Zum Programmieren des Gerätes
10. Nano-SIM-Karten-Einschub	SIM-Karte nicht entfernen!	SIM-Karte ist bereits eingelegt

## 2.2 Der tragbare Notrufknopf

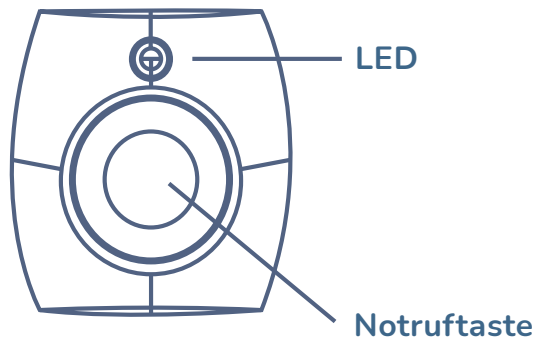

Der tragbare Notrufknopf sollte stets getragen werden, damit bei einem Notfall jederzeit ein Notruf ausgelöst werden kann. Der tragbare Notrufknopf ist wasserdicht und kann auch beim Duschen, Händewaschen oder Spülen getragen werden. Der tragbare Notrufknopf hat eine Reichweite von bis zu 1000m außerhalb von Gebäuden und mehr als 30m innerhalb von Gebäuden zum HOME Mini Gerät.

### Trageart

Der handliche Notrufknopf kann ganz nach Belieben am Arm oder um den Hals getragen werden und ist schnell umgerüstet.




## 2.2 Der tragbare Notrufknopf


### 1. Tragevariante - Armband

Der tragbare Notrufknopf wird als Armband geliefert. Sie können zwischen mehreren Varianten wählen. Darüber hinaus können Sie beliebige Standard-Uhrenarmbänder mit dem Notrufknopf verwenden.


1.

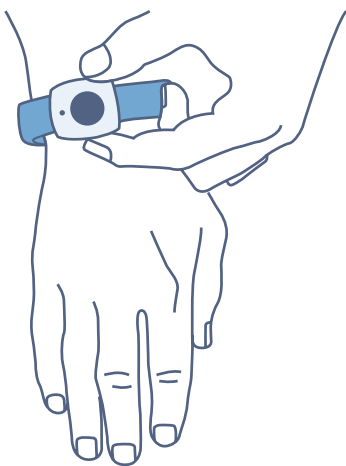


2.

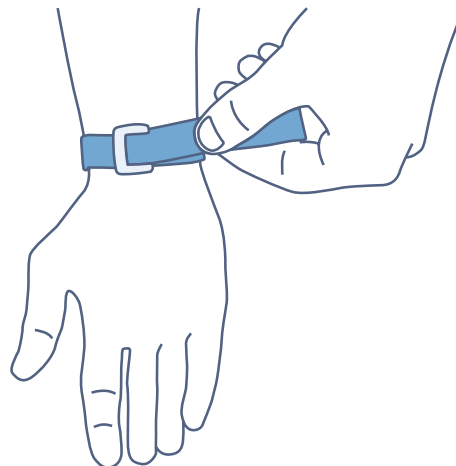

3.

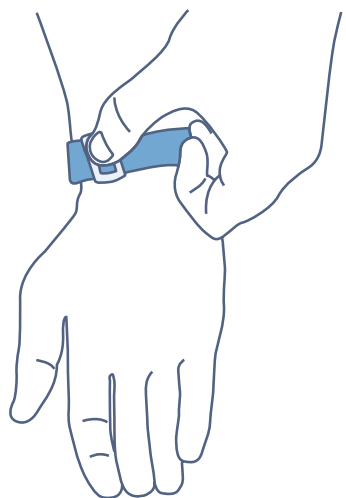

4.

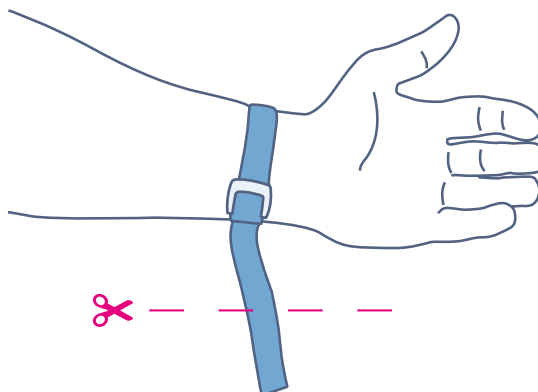


## 2.2 Der tragbare Notrufknopf


### 2. Tragevariante - Amulett

Im Paket ist außerdem ein Halsband enthalten, sodass Sie den tragbaren Notrufknopf als Kette tragen können. Der tragbare Notrufknopf hat eine Reichweite von bis zu 1000m außerhalb von Gebäuden und mehr als 30m innerhalb von Gebäuden.


1.

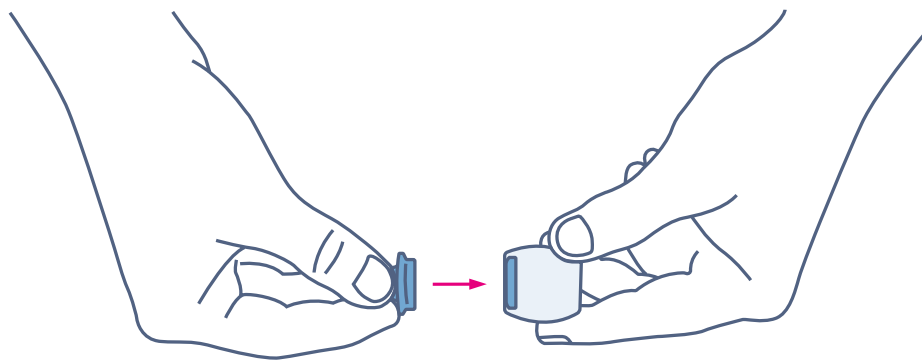

2.

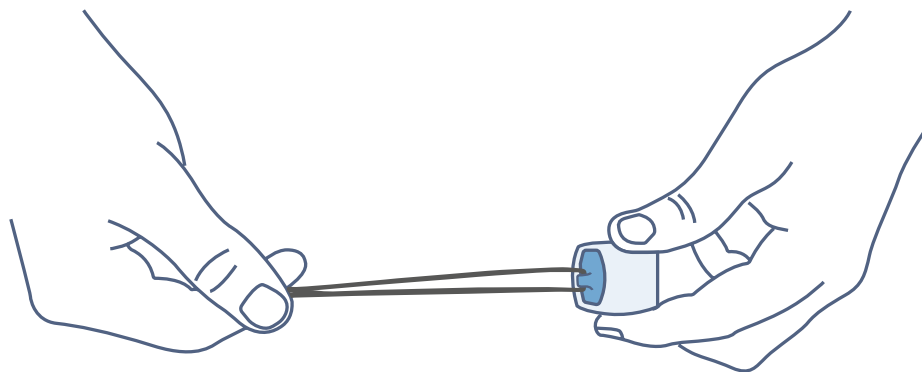

3.

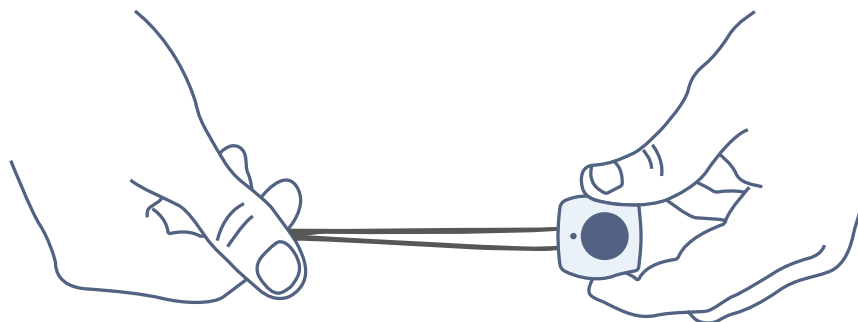


## 3 Installation

### 3.1 Aufstellungsort auswählen

Wählen Sie einen geeigneten Ort für die Basisstation. Sie benötigen dafür lediglich einen Stromanschluss und ein verfügbares GSM-Signal. Die Basisstation sollte leicht zugänglich sein und an einem zentralen Ort platziert werden, sodass eine gute Sprachverbindung gewährleistet ist. Sie sollte nicht an einem feuchten Ort wie in einem Badezimmer montiert werden, oder in der Nähe einer Wärmequelle wie einer Mikrowelle, die die Signalstärke reduzieren könnte.

## 3.2 Netzanschluss und Montage

- › Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit der Gleichstrombuchse (DC-Buchse) der Basisstation und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Legen Sie das Kabel in eine der Kabelführungen ein.
- › Stellen Sie den Akkuschalter an der Rückseite des Gerätes auf „ON“.

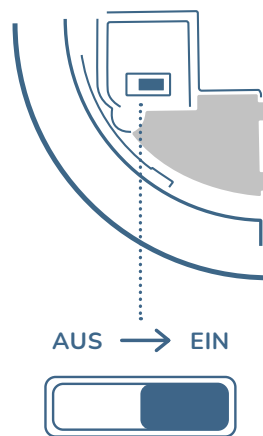

### Tischaufstellung

- › Zur Tischaufstellung kleben Sie den beiliegenden Gummifuß auf die Außenseite der Montageplatte (die Außenseite ist die Seite, auf der die Bohrlöcher und das Dreiecksymbol nicht sichtbar sind).
- › Zur Wandaufhängung montieren Sie die Montageplatte mit dem Dreieck nach oben an die Wand.
- › Befestigen Sie das Gerät auf der Montageplatte (Bajonettverschluss, beachten Sie die Kerben am Rand).

## 3.3 Akkubetrieb und Notstrom Aktivierung

- › Zusätzlich zu dem Netzteil ist die Basisstation zur Sicherheit für den Fall eines Stromausfalls mit einem Akku ausgestattet.
- › Im normalen Betrieb wird das Netzteil verwendet, um die Basisstation mit Strom zu versorgen und den eingebauten Akku zu laden.
- › Der Akkuschalter muss stets auf **ON** stehen, damit der Akku lädt, sobald die Verbindung zum Stromanschluss hergestellt wird.
- › Stellt man den Akkuschalter auf **OFF**, wird der Akku nicht geladen.

## 3.4 Überprüfen der Signalstärke

Wenn Sie das Gerät erstmalig aufstellen oder den Standort des Gerätes verändern, sollten Sie die Empfangsstärke des Mobilfunknetzes an diesem Ort überprüfen. Der HOME Mini hat eine Sprachausgabe und sagt die Empfangsstärke an, sobald es nach dem Einschalten Mobilfunkempfang hat. Dies kann bis zu 2 Minuten dauern.

Zum Überprüfen der Signalstärke im laufenden Betrieb drücken Sie die Zusatztaste acht Sekunden, bis Sie den zweiten Piepton hören. Danach sagt das Gerät die Signalstärke an: „GSM-Empfang“ gefolgt von einer Zahl 1 bis 5:

Die Mobilfunk-Signalqualität wird kontinuierlich durch das Produkt geprüft. Sollte diese einmal unzureichend sein, wird Ihnen dies durch blinken der roten LED alle 5 Sekunden angezeigt.



4-5:

Guter Mobilfunkempfang



2-3:

Ausreichender Mobilfunkempfang



1:

Schlechter Mobilfunkempfang. Suchen Sie ein besseren Standort für das Gerät.



Keine  
Ansage:

Kein Mobilfunkempfang. Suchen Sie ein besseren Standort für das Gerät.

## 4 Bedienung

### Alarm auslösen

#### Notruftaste 1x drücken

Wenn ein Alarm durch Drücken der Notruftaste am Notrufgerät oder durch ein eingelerntes Gerät (z.B. tragbarer Notrufknopf) ausgelöst wurde, gibt der HOME Mini einen Sprachhinweis aus "Notruftaste gedrückt" (optional) und wählt die Notrufzentrale an bzw. informiert Ihre Angehörigen.

### Notruf abbrechen

#### Notruftaste 5 Sekunden gedrückt halten

Je nach Programmierung durch die Zentrale gibt es eine Voralarm-Zeit, in der ein Notruf noch abgebrochen werden kann, indem die Notruftaste fünf Sekunden gedrückt wird.

### Anruf annehmen


#### Notruftaste 1x drücken, wenn das Notrufgerät klingelt

Hinweis: Das easierLife Mini ist normalerweise so voreingestellt, dass im Alarmfall das Gerät automatisch in der Notrufzentrale anruft.

Die Gesprächsannahmemodalitäten hängen von dem Hausnotrufanbieter ab. In Einzelfällen können durch den Hausnotrufanbieter auch andere Annahmemodalitäten (z.B. Freisprechen-/Hören außerhalb des Alarmfalls) eingestellt werden. Die grüne LED signalisiert die bestehende Notrufverbindung optisch durch blinken.

### Test-Notruf

Um sich mit dem Gerät vertraut zu machen, führen Sie gerne Test-Notrufe durch. Achten Sie während des Gesprächs auf die Sprachqualität und die Lautstärke und passen Sie diese nach Wunsch an. Teilen Sie der Notrufzentrale und/ oder Ihren Angehörigen unbedingt mit, dass es sich um einen Test-Notruf handelt und keine Notsituation vorliegt. Die Notrufzentrale nimmt Ihre Test-Notrufe gerne entgegen.

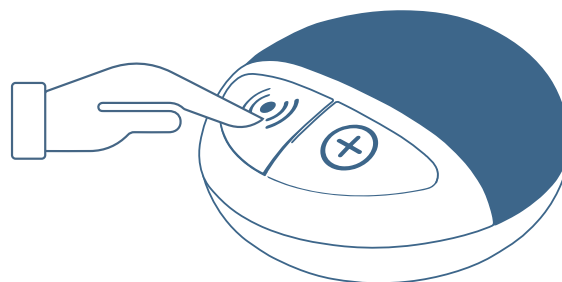

## 4.1 Wer wird bei einem Notruf alarmiert?

Der Ablauf eines Notrufs und eines Test-Notrufs ist grundsätzlich gleich:



### Hinweis:

Das Notruf-System ist normalerweise so voreingestellt, dass im Alarmfall das Gerät automatisch die Notrufzentrale anruft – sofern eine Notrufzentrale gebucht wurde.



## 5 Automatische Funktionen

### 5.1 Stromausfall



- › Bei einem Stromausfall meldet das Gerät automatisch den Stromausfall der Notrufzentrale, sowie der easierLife App und Ihren Angehörigen. Die grüne LED blinkt alle fünf Sekunden, während sich das Gerät im Akkubetrieb befindet.

### 5.2 Niedriger Akkustand




- › Sobald ein niedriger Akkustand länger als 5 Minuten andauert, sendet das Gerät automatisch eine entsprechende Meldung an die Notrufzentrale und die easierLife App und die rote LED blinkt alle 2 Sekunden.



- › Nachdem der Akku wieder geladen ist, sendet die Basisstation automatisch eine Meldung über die Wiederherstellung des Akkustandes an die Notrufzentrale bzw. die easierLife App und die rote LED geht aus.

## 5.3 Niedriger Batteriestand des Notrufknopfs

Wenn der Batteriestand niedrig ist, blinkt die LED am tragbaren Notrufknopf zweimal pro Sekunde. Bitte setzen sie sich dann mit Ihrem Hausnotrufanbieter in Verbindung. Gleichzeitig wird eine entsprechende Meldung automatisch an die Notrufzentrale und easierLife App übertragen.

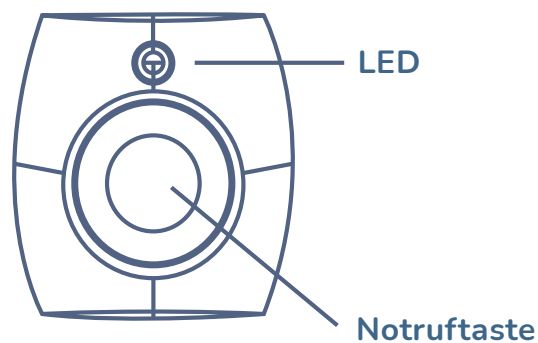

## 5.4 Funkstreckenüberwachung

Die Funkverbindung zwischen dem tragbaren Notrufknopf und der Basisstation wird automatisch täglich überprüft. Sofern keine Funkverbindung zwischen tragbarer Notrufknopf und Basis mehr besteht, sendet das Notrufgerät eine entsprechende Meldung an die Notrufzentrale sowie die easierLife App. Dasselbe gilt auch für andere, optionale Funkkomponenten.

## 5.5 Automatische Kontrollrufe

Das Notruf-System führt in regelmäßigen Abständen (Standardeinstellung: täglich) Systemüberprüfungen durch. Hierbei wird getestet, ob das Notruf-System korrekt funktioniert.

Die Systemüberprüfungen werden an die Notrufzentrale und easierLife übermittelt. Falls eine Störung vorliegt, etwa, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, schlechten Empfang hat, oder ein niedriger Akkustand festgestellt wird, wird eine Hinweismeldung an die Notrufzentrale oder die easierLife App gesendet. Standardeinstellung ist ein täglicher Kontrollruf.

## 6 easierLife App

Dank der easierLife App können sich Angehörige, Freunde und Bekannte jederzeit über das Wohlergehen des Notruf-Nutzers informieren. Geschieht ein Notfall, erhält man in Sekundenschnelle eine Benachrichtigung auf das Smartphone und kann auf dem Notruf-System anrufen, um sich nach der Lage zu erkundigen.

### Alles Wichtige auf einen Blick

In der App können Sie nicht nur den Empfang oder den Batteriestatus des Notruf-Systems sehen, sondern viele Einstellungen vornehmen, wie etwa das persönliche Helfernetzwerk verwalten. Falls Ihre Angehörigen, Freunde oder Bekannte über einen Notfall informiert werden möchten, benötigen diese ein Smartphone, um die easierLife App zu installieren.



Die easierLife App kann entweder über Google Play Store oder über Apple Store heruntergeladen werden. Eine detaillierte App-Anleitung finde Sie unter [www.easierlife.de/einrichtung](http://www.easierlife.de/einrichtung).



Falls Sie keine Notrufzentrale gebucht haben, ist die Installation der easierLife notwendig, um das System zu nutzen.

# 7 Wartung, Reinigung und erneuter Einsatz des Notrufsystems

## 7.1 Basisstation

Reinigen Sie die Basisstation nur mit einem feuchten Tuch. Bitte verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Tasten angreifen und die Kunststoffoberfläche matt werden lassen.

Wenn eine Desinfektion des Gerätes notwendig ist, so testen Sie das verwendete Desinfektionsmittel zunächst an einer unauffälligen Stelle (z. B. Unterseite) auf seine Verträglichkeit. Verwenden sie ausschließlich Desinfektionsmittel, die nicht auf Alkohol basieren. Aufgrund der Vielzahl der auf dem Markt befindlichen Mittel können wir Ihnen hier leider keine Empfehlung geben. Auch hier dürfen Sie das Gerät nur feucht abwischen.

Die Stoffabdeckung über dem Lautsprecher kann ausgetauscht werden, sofern dies erforderlich ist, um das Gerät in einem hygienisch einwandfreien Zustand zu halten.

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt. Bitte sorgen Sie insbesondere dafür, dass kein Wasser in den Lautsprecher und das Mikrofon gelangen.

## 7.2 Tragbarer Notrufknopf

Der tragbare Notrufknopf ist wasserdicht. Sie können ihn unter fließendem Wasser reinigen. Sollte dies nicht ausreichen, können Sie Spülmittel und eine weiche Bürste verwenden. Verwenden Sie keine alkoholischen Reinigungsmittel und auf gar keinen Fall Reinigungsbenzin.

Nach maximal 9 Jahren sollte der tragbare Notrufknopf ausgetauscht werden, da sich die Batterie dem Ende der Lebensdauer nähert. Dies wird von Ihrem Hausnotrufanbieter organisiert.

## 7.3 Wiedereinsatz des Gerätes

Das Gerät wird Ihnen von Ihrem Hausnotrufanbieter nur leihweise zur Verfügung gestellt. Bitte behandeln Sie es schonend, da es nach dem Einsatz bei Ihnen einem anderen Nutzer zur Verfügung gestellt wird.

Die empfohlene Nutzungsdauer des Geräts beträgt 9 Jahre. Danach sollte das Gerät vom Hersteller überprüft und eventuelle Verschleißteile ausgetauscht werden. Vor dem Wiedereinsatz ist sämtliches textile Zubehör (z. B. Umhängeband oder elastisches Armband) aus hygienischen Gründen auszutauschen und das Gerät wie oben beschrieben zu reinigen.

## 8 Wichtige Hinweise und Indikation von Hausnotruf-Systemen

Der easierLife HOME Mini als Pflegehilfsmittel kommt in Frage bei alleinlebenden oder über weite Teile des Tages alleinlebenden Pflegebedürftigen, die mit handelsüblichen Telefonen in Notsituationen keinen Hilferuf absetzen können und bei denen aufgrund ihres Alters, des Krankheits- bzw. Pflegezustandes jederzeit der Eintritt einer derartigen Notsituation erwartet werden kann. Sofern diese Voraussetzungen vorliegen, kann Ihnen der easierLife HOME Mini von Ihrer Pflegekasse zur Verfügung gestellt werden.

### 8.1 Sicherheitshinweise

- Versuchen Sie nicht, die mitgelieferte SIM-Karte zu wechseln.
- Schalten Sie den Akkuschalter an der Unterseite der Basisstation nicht aus. Das Gerät kann sonst im Fall eines Stromausfalls keinen Notruf mehr absetzen und wird eine Fehlermeldung an die Notrufzentrale und die easierLife App senden.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Der Akkuaustausch darf nur durch autorisiertes Personal erfolgen. ACHTUNG! Beim Einsetzen eines falschen Batterietyps besteht Explosions-Gefahr. Gebrauchte Batterien sind gemäß der Anleitung zu Entsorgen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil oder ein Original-easierLife-Ersatznetzteil. Fremde Netzteile, auch wenn sie dieselben Anschlusswerte aufweisen, sind nicht gegen das versehentliche Ausstecken am Gerät geschützt!

## 8.2 Anwendungsrisiken und Kontraindikationen

Das Hausnotruf-System easierLife HOME Mini kann nicht die persönliche Überwachung eines kranken, pflegebedürftigen oder behinderten Menschen ersetzen. Insbesondere weisen wir auf folgende Einschränkungen hin:

- Bei Personen mit Einschränkungen der geistigen Fähigkeiten (z. B. Demenz) ist das System nur bedingt einsetzbar. Zumindest sollte gewährleistet sein, dass der Benutzer versteht, dass er mit dem tragbaren Notrufknopf oder der Basisstation Hilfe herbeirufen kann.
- Bei der Trageart „Armbanduhr“ des mitgelieferten tragbaren Notrufknopfs ist eine Auslösung in der Regel nur möglich, wenn noch beide Arme bewegen kann. Eine sicherere Auslösung z. B. bei einem Schlaganfall gewährleistet die Trageart „Halskette“.
- Bei Störungen im Mobilfunknetz ist die Auslösung eines Notrufs unter Umständen nicht oder nur zeitverzögert möglich. Dasselbe gilt bei nicht ausreichender Empfangsstärke. Das Gerät sollte nach Aufstellung und Überprüfung der Empfangsstärke daher vom Benutzer nicht an einer anderen Stelle aufgestellt werden, ohne dass auch dort eine Messung der Empfangsstärke und eine Testauslösung erfolgt sind (siehe 3.4 Überprüfen der Signalstärke).
- Das Gerät löst nur auf Anforderung des Benutzers einen Notruf aus. Wenn eine plötzliche Erkrankung Bewusstseinsstörungen zur Folge hat, ist daher keine Auslösung durch den Benutzer mehr möglich (z. B. Epileptischer Anfall). Eine verbesserte Sicherheit kann hier mit dem optionalen Zubehör „smarte Sensoren“ erreicht werden.



# 9 Technische Spezifikationen

## 9.1 easierLife HOME Mini

Typenbezeichnung	Mini
Batterie	850 mAh, Ni-Mh Akku
Batterielaufzeit	72 Stunden
Lautsprecher	1,5 Watt
Mikrofon	Eingebaut
Mobilfunk	2G/ 3G/ 4G (GSM/ UMTS/ LTE)
SIM-Karte	Unterstützt 1,8V und 3V Nano SIM-Karten (bereits durch Leistungserbringer bestückt)
Spannungsversorgung	9V/ 1A Netzteil
Max. Leistungsaufnahme	230 V/ 0,5 A
Lautstärke	Durch Programmiersoftware einstellbar in fünf Stufen
Funkfrequenz	869.2375 MHz (EN-300-220, Class 1)
Betriebstemperatur	-10°C bis 45°C
Zulässige Luftfeuchtigkeit	Bis 85% relative Feuchte nicht kondensierend
Abmessungen	112 mm x 112 mm x 49 mm
Gewicht	182 g

## 9.1 easierLife HOME Mini

Max. Anzahl Funkkomponenten	20
Anzahl Notrufnummern	5
Kommunikationsprotokolle	Sprache, Text-SMS, MPTP über SMS, SIA-CID über IP, CSV über https

## 9.2 Tragbarer Notrufknopf

Typenbezeichnung	WTRS2
Batterie	CR2032 Lithium-Batterie, nicht austauschbar
Batterielaufzeit	Je nach Nutzung 9 Jahre
Funkfrequenz	869,2375 MHz (EN-300-220, Class 1)
Reichweite des tragbaren Notrufknopfs	bis zu 1000m im Freien und mehr als 30m innerhalb von Gebäuden
Betriebstemperatur	-10° bis 45°C
Schutzklasse	IP68
Abmessungen	31 x 29 x 13mm
Gewicht	12 g zzgl. Zubehör (Armband, Halsband)

## 10 Datenschutz

Die easierLife GmbH stellt grundsätzlich höchste Anforderungen an den Datenschutz. Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten ernst! Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß der Europäischen Datenschutzverordnung streng vertraulich behandelt und niemals an Dritte weitergegeben. Weiterführende Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie auf unserer Webseite unter folgendem Link:  
<https://www.easierlife.de/datenschutzerklaerung/>

## 11 Kontaktdaten bei Kundenfragen

Haben Sie Fragen zur easierLife App oder dem easierLife Notruf-System?  
Gerne stehen wir Ihnen telefonisch oder per Mail zur Verfügung!



+49 721 180 308-11



[service@easierlife.de](mailto:service@easierlife.de)



[www.easierlife.de](http://www.easierlife.de)

easierLife GmbH  
Herrenstr. 50a  
76133 Karlsruhe

# 12 EU-Konformitätserklärung

## EU Konformitätserklärung

EC-Declaration of Conformity

CE-Déclaration de Conformité

**Der Hersteller:**

The manufacturer:

Le fabricant:

**easierLife GmbH**

**Adresse:**

Address:

Adresse:

**Herrenstr. 50a**

**76133 Karlsruhe**

**Deutschland**

**erklärt, dass die Produkte:**

Declares that the products:

Déclare que le produits:

**easierLife HOME Mini**

**die Anforderungen der folgenden harmonisierten Normen erfüllt:**

complies to the requirements of the following harmonized standards:

répond aux exigences des normes harmonisées suivantes:

- EMC Directive 2014/30/EU
- LVD Directive 2014/35/EU
- RED Directive 2014/53/EU
- RoHS 3 Directive 2015/863/EU
- WEEE Directive 2012/19/EU

**Die folgenden relevanten harmonisierten Normen wurden angewandt:**

The following relevant harmonized standards have been applied:

La conformité a été vérifiée sur la base des normes européennes suivantes:

- IEC 62368-1/ EN-62368-1:2016
- EN-300220-2:2018-09 Short Range Radio
- EN 301489-1:2020 V.2.2.3
- EN 301489-3:2019 V.2.1.1
- EN-50134-1:2003 Social Alarm
- EN-50134-2:2018 Social Alarm
- EN-50134-3:2012 Social Alarm
- EN-50134-5:2005 Social Alarm

**Ort und Datum der Konformitätserklärung**

Place and date of declaration

Lieu et date de la déclaration

**Name und Unterschrift**

Name and Signature

Nom et Signature

**Karlsruhe, 01.02.2022**

**Klaus Bscheid**

(Geschäftsführer easierLife GmbH)

